

SOFT CONTACT LENSES

Instructions for use.
A Guide to Trouble-Free Soft Contact Lens Wear



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

CE 0088

CooperVision,
Hamble,
SO31 4RF, UK.

LF-0149A



* LF0149 *

Mielőtt kontaktlencséjéhez nyúl, mindig mossa meg és törölje szárazra kezét.
Ne használja a lencséket, ha a csomagolás sérült.

A kontaktlencséket tilos másnak kölcsönadni, vagy másét használni!

A LENCSEK BEHELYEZÉSE

1. Győződjön meg róla, hogy a lencse nincs-e kifordulva. Helyezze a lencsét mutatóujjára, hogy alakját ellenőrizze. (1. és 2. ábra).
2. A másik kezének mutató és középső ujjával húzza fel felső szemhéját. A lencsét tartó kezének gyűrűsujjával pedig húzza le az alsó szemhéját. (3. ábra). Ismétlje meg a műveletet a másik szemén is.

A LENCSEK ELTÁVOLÍTÁSA

Nézzen fel, és húzza le az alsó szemhéját. Mielőtt a kontaktlencsét mutató és hüvelykujjával eltávolítaná, finoman húzza lefelé a szeme fehérjén. (4. ábra) Ismétlje meg az eljárást a másik szemén is.

FERTŐTLENÍTÉS/ÁZTATÁS

A többször használatos kontaktlencsét naponta kell tisztítani és fertőtleníteni, szigorúan betartva a tisztítófolyadék flakonján olvasható előírásokat, illetve szemésze, illesztője utasításait.

Figyelem: A napi eldobható lencsék egyszeri használatra készültek. Utána eldobandók! Ha lencséi napi, egyszeri használatra készültek, **TILOS** több mint egyszer használni. A napi eldobható lencsék nem alkalmasak a tisztításra, fertőtlenítésre, illetve ismételt használatra. Az ismételten felrakott napi eldobható lencse megsérülhet, és ezáltal Önre nézve nagyobb lesz a kontaktlencse kezeléssel kapcsolatos szemgyulladás és egyéb problémák kockázata.

HA A LENCSEK KISZÁRADNÁNAK

Nedvesítse újra a lencséket a fertőtlenítő, áztató vagy öblítő oldattal, majd kövesse a fenti FERTŐTLENÍTÉS/ÁZTATÁS pontban leírtakat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Szemésze minden típusú lencséhez ajánlani fog egy lencse viseleti, tisztítási és cserélési metódust. Ne változtasson a javasolt eljárásán. Ha kételye támad, kérje illesztője tanácsát.
2. Ha hosszabb ideig használja lencséit, távolítsa el és dobja el lencséit a lencse cseréjét megelőző este, majd másnap új lencsét helyezzen fel.
3. Ha a szeme piros lesz, vagy irritálást vagy fájdalmat érez, vagy látásában váratlan változás következik be, azonnal távolítsa el lencséit, és forduljon szemorvoshoz.
4. Kerülje a lencsék kozmetikumokkal vagy aeroszollal való szennyezését, illetve viselésüket mérgező gázok közelében.
5. A sérült, szennyezett vagy megkarcolódott lencséket azonnal cserélje le.
6. Kerülje a hosszú körmöket, ami baktériumhordozó lehet és felsértheti a szemet vagy a lencsét. A sérült szem könnyen megfertőződik.
7. A lencséket gyermekek elől elzárva kell tartani.
8. Vízi sportok üzése közben csak akkor viseljen kontaktlencsét, ha vízmentes szemvédőt is használ.

FIGYELMEZTETÉS!

1. **NE VISELJE** kontaktlencséjét éjjel-nappal csak akkor, ha azt illesztője javasolta és biztosította ennek biztonságos voltáról.
2. **NE VISELJE** kontaktlencséjét hosszabb ideig annál, mint amit illesztője javasolt Önnek.
3. **NE HASZNÁLJON** háztartási tisztítószerket (például fertőtlenítőszerket) kontaktlencséje tisztításához.
4. **NE VISELJE** kontaktlencséjét, ha szemcseppeket használ (kivéve, ha ezt tanácsolták Önnek).
5. **NE HASZNÁLJON** nyilat lencsei nedvesítésére.
6. **NE ÖBLÍTSE** kontaktlencséjét vagy a kontaktlencse-tartót csapvízzel.